

PROFESSIONELE
SCHAAFWONDEN KIT

MASTER PLASTER

Sneller

Twee keer zo
snel genezen.



Beter

Pleister hecht
niet aan de wond.



Gemak

Waterproof.
Zelfs douchen is
mogelijk.



www.masterplaster.eu

EEN REVOLUTIE IN SCHAAFWONDBEHANDELING



Master Plaster is een revolutie in schaafwondbehandeling



Met Master Plaster genezen schaafwonden twee keer zo snel. De pleister hecht niet aan de wond. Zelfs douchen is mogelijk.

STAPPENPLAN

Behandeling van de schaafwond met de Master Plaster Kit. Bekijk ook de informatie op de website www.masterplaster.eu



01 Bescherming:

Gebruik beschermingshandschoenen bij het behandelen van andermans wonden om infectie te voorkomen.

02 Schoonspoelen:

Spoel de schaafwond goed af met lauw water om het vuil uit de wond te verwijderen.

Tip: Indien mogelijk eerst een douche nemen.



03 Scheren:

Verwijder haren rond de wond. Hierdoor is het eenvoudiger de pleister waterdicht aan te brengen.

04 Desinfecteren:

Desinfecteer de wond en dep deze af met steriel gasverband.

Tip: Ruim desinfecteringsvloeistof gebruiken



Bestel op tijd uw nieuwe pleisters via de webshop op www.masterplaster.eu



05 De pleister aanbrengen:

Neem een **Hypodress BWT pleister** van het geschikte formaat. Zie de instructie op de verpakking. De beschermfolie aan de bovenkant pas verwijderen na het aanbrengen van de pleister (blauwe strip).




Tips:

- *Houd knie en elleboog licht gebogen. De Master Plaster is elastisch.*
- *Als de pleister te smal is, plak dan meerdere pleisters naast elkaar en knip van één van de pleisters er één plakrand af.*
- *De wond geneest beter wanneer er snel met de behandeling wordt gestart. Start in ieder geval voordat er korstvorming optreedt.*

06 Genezing:

Laat de pleister circa 2 tot 4 dagen zitten. Vervang eerder indien het wondkussen van binnen uit vuil wordt.

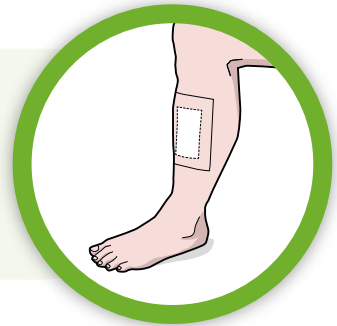

Tips:

- *Als de pleister strak is aangebracht, dan is douchen gewoon mogelijk.*
- *De pleister plakt niet aan kleding en beddengoed en is comfortabel te gebruiken tijdens het sporten.*



07 Vervang de Hypodress BWT pleister:

Ga hiermee door totdat de wond volledig genezen is.

De Master Plaster Kit is ontwikkeld door het combineren van de kennis en ervaring van een arts, een ex-prof wielrenner en 100 jaar Italiaans vakmanschap.

Sneller

Met de Master Plaster Kit genezen schaafwonden twee keer zo snel. Het geheim van Master Plaster is de zogenaamde vochtige wondgenezing, waarbij er geen korstvorming optreedt. De wond is daardoor ook minder pijnlijk, er is minder kans op infectie en minder kans op het vormen van littekens.

Beter

De Master Plaster Kit neemt de nadelen weg van traditionele behandelingsmethoden. De pleister hecht niet aan de wond zodat het nieuwe huidweefsel niet wordt meegetrokken bij het verwijderen van de pleister. Heeft u een schaafwond op knie of elleboog? De pleister is elastisch en beweegt mee bij het buigen.

Gemak

De pleister is eenvoudig zelf aan te brengen en draagt comfortabel onder kleding en bij het sporten. De pleister is waterproof waardoor de wond schoon blijft bij het sporten in de regen. Het vervelend plakken van kleding en beddenlakens aan schaafwonden behoort tot het verleden. Met de pleister kunt u zelfs gewoon onder de douche.



Schaafwonden zijn goed zelf te behandelen. Het stappenplan is geen medisch advies en bij twijfel adviseren wij u een arts te raadplegen, zoals in de volgende gevallen:

- De wond gehecht moet worden.
- U de wond niet goed kunt schoonmaken.
- De wond sterk bloedt.
- De wond geïnfecteerd raakt.
- De wond niet of slecht geneest.



“Ook in het mountainbiken ligt een schaafwond altijd op de loer. Dankzij Master Plaster hoeft dit een snelle hervatting van training en wedstrijden niet meer in de weg te staan”

Bart Brentjens, manager CST-Sannd-American Eagle MTB racing team.

*Sport veilig, alleen
voorkomen is beter dan
genezen met Master Plaster.*

Preventief in huis

Zorg ervoor dat u de Master Plaster Kit preventief bij de hand heeft. De wond geneest beter wanneer er snel met de behandeling wordt gestart. De Master Plaster Kit is daarvoor speciaal ontwikkeld en bevat alles wat nodig is voor een professionele behandeling van schaafwonden.

Bestellen

U kunt eenvoudig via de webshop de verschillende kits en navulpakketten bestellen. Er zijn zowel kits beschikbaar voor individuele sporters als voor sportteams. U kunt meer informatie terugvinden op de website www.masterplaster.eu



Master Plaster

Master Sportoore BV
Postbus 98
5056 ZH Berkel-Enschot
e-mail: info@masterplaster.eu

www.masterplaster.eu

EEN REVOLUTIE IN SCHAAFWONDBEHANDELING